


So nehmen Sie die Speichelprobe richtig!

Sehen Sie sich auch das YouTube Video an - <https://www.youtube.com/watch?v=04-cDon8cHc>

Bitte 30 Minuten bis 2 Stunden vor der Probenahme NICHT essen, trinken, nicht den Mund ausspülen oder die Zähne putzen. Am besten nehmen Sie die Proben als erstes nach dem Aufstehen!

Das Probenset enthält 3 Röhrchen mit Wattestäbchen zur Probensammlung.

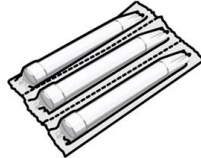

Ziel ist es, alle 3 zu verwenden, um eine Probe zu sammeln.




Nehmen Sie das erste Röhrchen aus der Plastikverpackung und anschließend das Wattestäbchen aus dem Plastikröhrchen ohne das Wattestäbchen zu berühren!

Streichen Sie mit dem Wattestäbchen über alle Oberflächen Ihres Mundes: Auf und unter der Zunge, der Wange, hinter den Lippen usw. **Machen Sie dies für mindestens 30 Sekunden.**



Geben Sie das Wattestäbchen in das Röhrchen zurück, aber NICHT wieder in die Plastikhülle zurück, da dies ein Austrocknen durch die (weiße) Trocknungsmembran am Ende des Röhrchens verhindern würde.

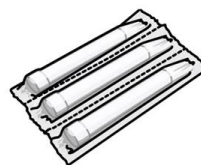


Wiederholen Sie diesen Vorgang mit allen 3 Probensets.

PROBENVERSAND

SCHRITT 4/4



Kleben Sie nach der Probenentnahme jeweils einen der beiliegenden Barcode-Aufkleber auf jedes Röhrchen.

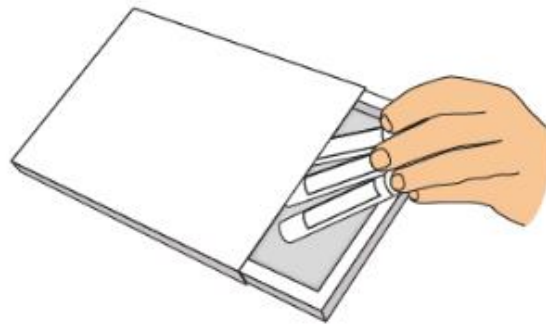

Legen Sie die Swabs und die verbleibenden Barcode-Aufkleber zurück in die Box.



Verschließen Sie die Box und senden Sie sie zurück an das Labor. Die Adresse ist aufgedruckt.

